

Media máscara filtrante de partículas FFP2 NR

Información General

Descripción

Modelo Malva

Referencia: GASV-02, talla mediana

Media máscara filtrante de partículas sólidas y líquidas que cubre nariz, boca y mentón tipo FFP2 NR según la norma de la UE EN149:2001 + A1:2009. Compuesta por 5 capas, acabados sellados por ultrasonido, con elásticos de sujeción y pinza ajustable en la nariz.

Exento de **látex y grafeno**.

No estéril.

Medidas (máscara plegada)

Ancho total 10,0 cm

Largo total 15,8 cm

Color blanco



Características técnicas

Especificaciones

Catalogada como EPI (Equipo de Protección Individual) categoría III (Reglamento UE 2016/425).

Cumplimiento de la Norma EN149:2001 + A1:2009.

Recomendaciones

Uso exclusivo de adultos.

Uso máximo recomendable 8 horas.

No reutilizable.

Composición

Doble capa de no tejido Spunbond

Doble capa Meltblown

Capa extra de tejido spunlace

Logística

Bolsa individual 1 Ud.



Tipo	Uds. individuales	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Nº packs	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (kg)
Pack	30	20	20	12	1	0,24	0,31
Caja	450	60	40	33	15	4,65	5,65
Caja Máster	6.480	120	80	110	216	67,69	74,45

Nota: El uso de estas mascarillas no exime del cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, así como del resto de medidas expuestas por el Ministerio de Sanidad.

Instrucciones de uso



1. Lávese las manos con agua y jabón y / o una solución hidroalcohólica antes de manipularlo. Abra la mascarilla teniendo cuidado de no tocar su interior, compruebe que está correctamente orientada con la parte oblicua hacia el exterior y la pinza nasal en la parte superior.
2. Sostenga la mascarilla contra su barbilla asegurándose de que la nariz y la boca estén completamente cubiertas. Ajuste la forma de la pinza nasal con ambas manos para que la mascarilla se adhiera al rostro y no queden espacios entre la piel y la mascarilla.
3. Tire de las bandas de goma y colóquelas detrás de las orejas.
4. Ajuste la posición de la mascarilla asegurándose de que no queden huecos alrededor del perímetro de la mascarilla y de que pueda respirar cómodamente.
5. Antes de cada uso, verifique la integridad del dispositivo y sus componentes.
6. Si está dañado, no debe usarse.
7. Se debe realizar una comprobación del ajuste:
 - A. Póngase la máscara.
 - B. Cubra la superficie del filtro con las manos o con una película de plástico.
 - C. Inhale lentamente.
 - D. Si la mascarilla está bien ajustada, se contrae y debería ser imposible seguir inhalando.

El tratamiento de las mascarillas contaminadas y desechadas debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente en el país de uso.

El uso inadecuado de la mascarilla o el incumplimiento de las instrucciones de uso pueden provocar una exposición a contaminantes atmosféricos y causar graves daños a la salud.

** Nota: Las barbas o los accesorios decorativos (piercings, etc.) pueden impedir un sellado satisfactorio entre la cara y la máscara. Esto reduce la eficacia de la mascarilla.

Recordatorio:


- El usuario debe familiarizarse con el uso de estas máscaras antes de ponérselas.
- Este producto no protege a quien lo usa de gases, vapores o atmósferas que contengan menos del 19,5% de oxígeno.
- No reutilizable, ni lavable. Horas máximas de uso recomendadas: 8.
- La mascarilla debe desecharse y reemplazarse si está dañada o si se dificulta la respiración.
- No modifique la mascarilla de ninguna manera.
- No utilice máscaras con filtro en espacios reducidos o en atmósferas explosivas.
- Mantener a una temperatura de -20°C a 50°C
- Humedad relativa máxima durante el almacenamiento: <80%

Consulte la Declaración de conformidad en la web: www.onysafe.com

También puede solicitarlo a través del correo electrónico: hola@onysafe.com

Advertencias:

- Asegúrese siempre de que el producto sea:
 - o Adecuado para la aplicación
 - o Correctamente ajustado.
 - o Utilizado durante todo el tiempo que el usuario está expuesto.
 - o Reemplazado cuando sea necesario.
- La selección, capacitación, uso y mantenimiento adecuados son esenciales para que el producto ayude a proteger al usuario de ciertos contaminantes en el aire.
- No seguir todas las instrucciones sobre el uso de estos productos de protección respiratoria y / o no hacer un uso correcto o incompleto del producto durante todos los períodos de exposición puede afectar negativamente a la salud del usuario, provocar una enfermedad grave o potencialmente mortal o una discapacidad permanente.
- Para la idoneidad y el uso adecuado, siga las normativas locales.
- Suspenda su uso si experimenta dificultad para respirar, malestar o se producen reacciones adversas.
- No utilice el paquete si está dañado, ha sido manipulado o no tiene una etiqueta con el número de lote y la fecha de fabricación.
- No lo utilice si está húmedo, sucio o dañado.
- Condiciones de almacenamiento recomendadas: humedad relativa inferior al 80%, interior bien ventilado, sin gas ni material corrosivo, evitar altas temperaturas o exposición a la luz.

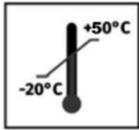


Rango de temperatura de las condiciones de almacenamiento



Humedad relativa máxima de las condiciones de almacenamiento



Ver guía suministrada por el fabricante

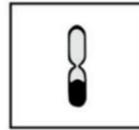

Vida útil: 60 meses desde fecha de fabricación